

# Guía de inicio rápido ESPAÑOL

## MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL – BP01



telli health

1 Su dispositivo está listo para usar. No hay nada que usted deba hacer además de seguir las instrucciones. Conecte el tubo del brazalete al lado izquierdo de su dispositivo.




2 Coloque el brazalete alrededor de la parte superior de su brazo izquierdo o derecho de manera que el tubo esté alineado con su dedo medio, apuntando hacia su antebrazo y palma.




Ajuste el brazalete para que quede firmemente colocado alrededor de su brazo superior.

3 Apoye su brazo (por ejemplo, descansándolo sobre una mesa con una almohada o un libro para ajustar la altura del brazo) de modo que el centro del brazalete esté a la altura del corazón.

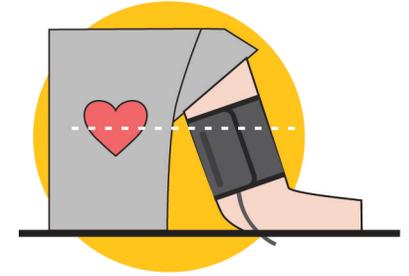

Siéntese cómodamente. Asegúrese de que su espalda esté recta y apoyada. La palma de la mano debe estar hacia arriba.


4 Comience la medición en su dispositivo.

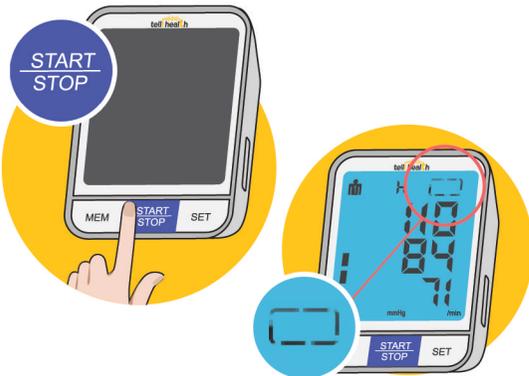

Una vez que obtenga su lectura, aparecerá un rectángulo en su pantalla. Después de que aparezca el rectángulo, puede quitarse el brazalete.

5 Espere hasta que su dispositivo muestre "End" y se apagará automáticamente\*.


\*El dispositivo puede tardar varios minutos en conectarse a la red celular y completar la transmisión.

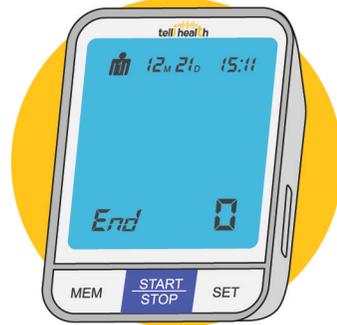

**¡HA TERMINADO!**

### ALERTA DE RECORDATORIO:

A veces, la pantalla del dispositivo parpadeará en color naranja para recordarle que debe tomar una lectura.

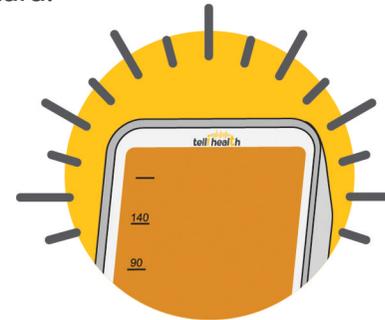

Para detener el recordatorio, por favor, realice una lectura de presión arterial de manera normal.

### SILENCIAR RECORDATORIO:

El usuario puede silenciar temporalmente el recordatorio presionando las teclas SET y MEM al mismo tiempo.

